

BRUGSANVISNING

KØRSELSINSTRUKTION

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Det er vigtigt at du læser hele denne brugsanvisning inden du tager din Eloflex i brug, for at være sikker på at du bruger den uden at løbe nogen risiko, og dermed ikke forøger skade på dig, dine omgivelser eller din el-kørestol.

**Eloflex
H**



EL&FLEX

Tak og god fornøjelse!

Tak fordi du valgte en Eloflex som din el-kørestol. Det betyder meget for os fordi vores vision er at gøre menneskers hverdag lidt lettere, og at give mennesker som er bevægelseshæmmede en større frihed. Vi håber at det er det du vil opleve når du bruger din nye Eloflex.

Vi véd at du kommer til at få stor glæde af din nye el-kørestol. Denne brugsanvisning indeholder vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og pleje. Vi opfordrer dig til at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden du tager din Eloflex i brug for første gang. Vi anbefaler også at du øver dig i at køre din Eloflex et sted hvor du kan køre frit og uhindret, så du får fornemmelsen for at køre og styre din Eloflex, inden du bruger den i almindelig sammenhæng.

Eloflex el-kørestol er konstrueret til brugere med mange forskellige behov. Beslutningen om hvorvidt en Eloflex er det rigtige for brugeren tages af brugeren selv evt. i dialog med kommunen eller forhandleren. Eloflex fralægger sig ethvert ansvar for tilfælde hvor el-kørestolen ikke passer til brugerens behov.

En Eloflex skal først og fremmest bruges i sin standard udførelse. Hvis el-kørestolen skal tilpasses eller ændres må det kun ske igennem kommunens værksteder eller af Eloflex. Du skal være opmærksom på at skader og fejl som opstår på grund af at man ikke har fulgt brugsanvisningen eller på grund af manglende vedligeholdelse, vil disse ikke være omfattet af garantien.

Held og lykke, og rigtig god fornøjelse med dine nye Eloflex.

Kør forsigtigt !



Indhold	Side	Side
Tiltænkt anvendelse	3	Sikkerhedssele 9
Fold ud	4	Justering af lændestøtte 10
Fold sammen	5	Justér ryglænet 10
Installér joystick-kontrollen	6	Justering af låsehage 11
Fold joystick ned	6	Transport og opbevaring 11
Opladning af batterier	7	Joystick 12
Manuel kørsel	7	Ekstraudstyr 13
Justér armlæn	8	Kørselsinstruktion 14-16
Fodstøtten	8	Sikkerhedsinstruktioner 17-19
Håndtaget på ryglænet	9	Tekniske data 20
Vippebeslag	9	Kontakt 20

Avsedd anvndning

Typeklassificering og tiltnkt anvendelse.

Eloflex el-krestole er udviklet for personer som har svert ved at ga eller som ikke kan ga, men har synet, frlighed og mentalt er i stand til at styre en el-krestol.

Eloflex el-krestol har en strrelse og beveglighed som gor den let at bruge indendrs, men stolen er iser egnet til udendrsbrug. I kapitlet "Tekniske data" finder du information om hastighed, venderadius, rekkevidde, maksimal stigning, maksimal vegt p bruger o.s.v. Vi anbefaler at du lser alt om sikkerhed i afsnittet "Sikkerhedsinstruktioner" .

Eloflex er testet og godkendt iflge EN12184:2014 - klasse B (Inden- og udendrsbrug).

Eloflex er ogs godkendt iflge ISO-7176, IEC60601 og batterierne er godkendt iflge UN38.3.

Eloflex el-krestole opfylder alle anbefalede krav i loven (1993:584) om medicintekniske produkter samt i forskrifterne (LVFS 2003:11 og LVFS 222009:18) om medicintekniske produkter. Produktet opfylder herved kravene i EU's direktiv om medicintekniske produkter, 93/42/EEU og 22007/47/EU.

Sammenligningsbedmmelse/CE-merkning iflge klasse 1 er udfrt i overensstemmelse med det medicintekniske direktiv 93/42 EEG / MPG (lov om medicintekniske produkter) og gelder kun for det komplette produkt. CE-merkningen bliver ugyldig hvis man udskifter dele og/eller ekstraudstyr som ikke er godkendt til dette produkt.

Anvendelse/behov

Hensigten med en Eloflex el-krestol er at kompensere for en skade eller nedsat funktion, hvorfor den anbefales til flgende :

- Hvis brugeren ikke kan, eller er strkt begrnset i at ga, hvilket gor det svert at bevege sig omkring i hjemmet og lokalt.
- Hvis der behov for at kunne bevege sig ud fra hjemmet for at komme ud i den friske luft eller for at kunne komme til de steder som normalt skal besges for at udfre de daglige rinder.
- Hvis brugeren har svert ved at komme til, eller at udfre arbejde og andre aktiviteter p grund af sin begrnsede beveglighed.

Eloflex er egnet til brug bde inden- og udendrs, og hvis det p grund af begrnset beveglighed ikke er muligt at anvende manuel krestol, men brugeren er i stand til p korrekt vis at hndtere en el-drevet krestol, er Eloflex det oplagte valg.

Tilbehr

Oplader og pung med almindeligt verktj ligger i posen under sdet nr stolen leveres.

Anvendelse

Anvend kun Eloflex el-krestol nr den er i fuld funktionsdygtig stand. Ellers udstter du dig selv og andre for risiko. Flgende liste indeholder visse tnkelige situationer. Den beskriver kun visse situationer som kan pvirke anvendeligheden af el-krestolen.

- Anvend ikke el-krestolen hvis batterierne er defekte eller deformede.
- Anvend ikke el-krestolen hvis motorerne krer i ryk eller lyder unormalt.
- Anvend ikke el-krestolen hvis det virker som om der er fejl ved bremserne.
- Kontakt din kommune eller forhandler hvis dkkene er nedslidt.
- Kontakt din kommune eller forhandler hvis du opdager skade p sikkerhedsblte, armlen, sde, ryglen, joystick eller anden del af stolen.
- Kontakt din kommune eller forhandler hvis du opdager skade p de elektriske dele (ledninger, batterier, oplader o.s.v.)

Garanti

Du har to rs garanti p din el-krestol fra Eloflex. Garantibetingelser er i overensstemmelse med de geldende nationale og generelle forretningsbetingelser og love. De detaljerede garantibetingelser kan du downloade p www.eloflex.dk. Du skal huske at gemme originalemballagen som du modtog din Eloflex i, under hele garantiperioden. Du kan folde kartonen sammen og opbevare den sammen med de 2 hvide stdpuder i tilfælde af at stolen skal returneres under garantiperioden.

Holdbarhed

Din Eloflex er beregnet til at holde i mindst 5 r. Produktets levetid pvirkes dog i stor udstrkning af hvordan den anvendes og passes. En Eloflex kan have betydeligt lngere levetid hvis man passer p den og bruger den som beskrevet i denne skrivelse.

Sikkerhedsinstruktioner og risici

LS BDE KREINSTRUKTION OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER GRUNDIGT IGennem INDEN DU TAGER DIN ELOFLEX I BRUG.



Fold ud

1. Stil den sammenklappede stol op i lodret position og fold fodstøtten ud. Billede 1.

2. Tag fat i håndtaget bag på ryglænet og træk tilbage. Hold samtidigt imod med en hånd på sædet. Billed 2.

3. Luk låsekrogen. Billede 3.

4. Fold vippebeslag ud ved at trykke på knappen og sving vippebeslag ud. Billede 4.

5. Hæv armlæn til ønsket højde. Billede 5.




VIKTIGT!

Det er meget vigtigt at du husker at låse låsekrogen og folde vippebeslag ud, inden stolen tages i brug.

3



4

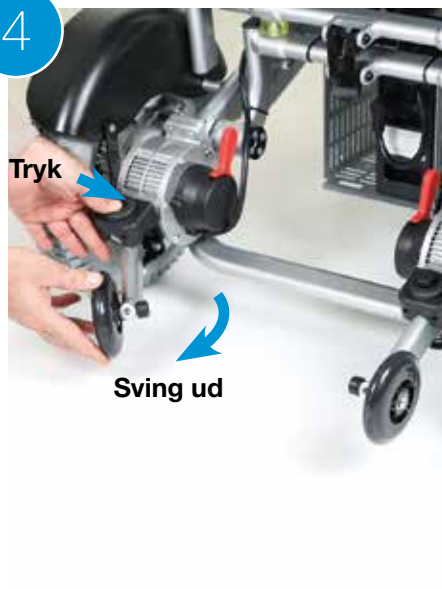


5



Fold sammen

Fold sammen

1. Sænk armlæn. Billede 1.
2. Fold vippebeslag ind ved at trykke på knappen og sving dem indad. Billede 2.
3. Åben låsekrogen. Billede 3.
4. Tag fat i håndtaget bag på ryglænet og pres fremad. Hold samtidigt imod med en hånd på sædet. Billede 4.
5. Fold fodstøtten op. Billede 5.

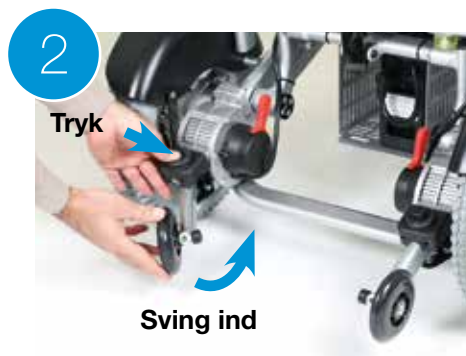

Læs mere...
... om hvordan du justerer
armlænet på side 8.



Installér joystick-kontrollen

Trin 1

Montér joystick i holderen under armlænet og spænd skruen.



Trin 2

Sæt stikkontakterne sammen og drej forsigtigt til stifterne går ind i hullerne og hylstrene i de to kontakter kan trykkes sammen. Skru derefter de 2 gevind imod hinanden så stikket låses.



VIKTIGT!

Vær forsigtig så stifterne i stik ikke skades eller bøjes.

Læs mere!

Hvis du vil flytte joystick til venstre armlæn så finde du instruktion på www.eloflex.dk/instruktioner

Fold joystick ned

Den smarte joystick gør at brugeren hurtigt kan folde joysticket ned, uden at skulle tage det af. Dette betyder at man kommer nærmere en bordkant så man sidder bedre når man skal spise.

1. Åben låsehagen for at løsne joystick.
2. Træk joysticket forsigtigt fremad.
3. Lad joysticket svinge ned.



Opladning af batterier

Sådan lader du batterierne op

Start med at slukke for din Eloflex (alle lamper i joysticket skal være slukkede).

Sæt det 3 benede oplader stik ind i indtaget på joystickets front. Vær opmærksom på at de 3 ben i stikket passer til de 3 tilsvarende huller i joysticket før du presser stikket ind i joysticket.

Derefter sætter du stikket i kontakten og tænder på kontakten i væggen.

Opladning indikeres ved at en rød lampe lyser i ladeboksen. Når lampen er rød oplader stolen. Efter 3-5 timer lyser laderen grøn og så er batteriene fuldt opladt.

Når opladeren arbejder bliver ladeboksen varm, og det er helt normalt.

For at få maksimal levetid for dine batterier anbefaler vi at du sætter din stol til opladning når batteri indikatoren er nede på 2-3 grønne lys.

Husk at tage opladeren ud når batterierne er fuldt opladt. Lad ikke stolen stå med tændt oplader efter den er fuldt opladt.



Hvis du bruger din Eloflex om vinteren i minusgrader så påvirkes kørestrækningen. For eksempel ; hvis du kører en tur i minus 10° celcius så reduceres din rækkevidde med ca 50%.

Yderligere information om batterier og opladning findes på www.eloflex.dk



VIGTIGT!
Sæt **ALDRIG** opladeren til opladning direkte nede i batterierne.
Opladning må **KUN** ske igennem Joystick.

Manuel kørsel

Sluk for strømmen på joysticket. Tryk de røde håndtag der sidder på motorene frem. (se billede) for at slå de magnetiske bremses fra. I denne position kan stolen skubbes/køres manuelt.

VIGTIGT! Hvis brugeren anvender stolen uden assistance fra hjælper skal stolens magnetiske lås altid være tilsluttet.




Justér armlæn

For optimal siddekomfort kan man justere højden på armlænen.

Gør således:

1. Løsn låsen ved at løfte låshagen.
2. Hæv eller sænk armlænen til den ønskede højde.
3. Spænd låsehagen ned igen.

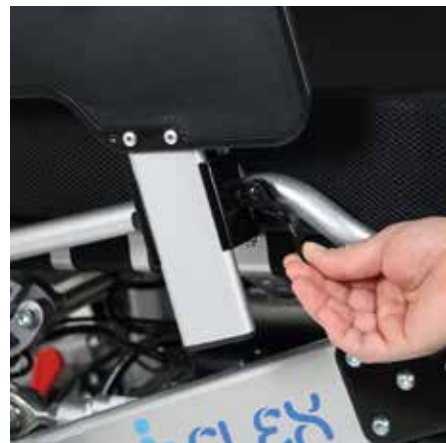

TIPS!

Du kan tage armlænen helt af for at gøre ind- og udstigning lettere.

Fodstøtten

For lettere ind- og udstigning kan fodstøtten slås op som billederne nedenfor viser.



Håndtaget på ryglænet

Dette håndtag anvendes for at rulle stolen manuelt. Håndtaget kan slås op når det ikke bruges.




Vippebeslag

Du kan vippe disse beslag ind ved sammenklapning af stolen og ved transport.

1. Tryk på knappen.
2. Sving vippebeslaget ind.

OBS! Vippebeslaget skal altid være foldet ud når du bruger stolen.

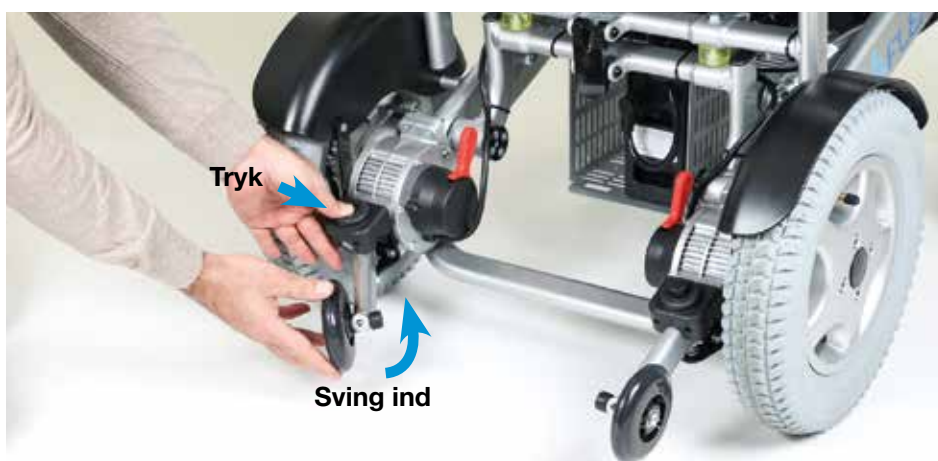

Sikkerhedssele

For sikker kørsel anbefaler vi at man altid anvender sikkerhedsselen når man kører i stolen.



Justering af lændestøtte

Model H er udstyret med et praktisk lændestøtte for optimal siddekomfort.

For at justere lændestøtten gør du således.

- 1.** Løft rygdækken af på forsiden.
- 2.** Løsn eller spænd lændestøtte ved hjælp af velcrolukningen til passende støtte.
- 3.** Hvis du ikke ønsker lændestøtte fjerner du bare hele lændestøtten.



Justér ryglænen

Løft rygdækken af på bagsiden af ryglænet ved at træk i det så velcroen løsner sig.

Spænd eller løsn bagsiden af ryglænet ved at stramme eller løsne velcrobåndene for den optimale siddestilling.

Sæt rygdækkenet på plads ved at trykke let så velcroen igen fæstner rygdækkenet.



Justering af låsehage

Det er vigtigt at låsehagen på din Eloflex er lidt træg at få op og ned. Den skal være så stram at den kan stå i vandret position.

Dette er vigtigt for at låsehagen skal kunne blive i den låste position selv når fjedrene presses sammen. For at spænde låsehagen skal du bare spænde de to skruer som holder låsehagen på plads.



Det er vigtigt at låsehagen er stram når du åbner og lukker den, så den ikke åbner sig når man bruger stolen.



Transport og opbevaring

- En sammenklappet stol kan lægges i bagagerum i en bil eller stilles ind i en garderobe.
- Hvis stolen ikke skal bruges i en periode anbefaler vi at batterierne oplades fuldt inden stolen stilles væk.
- Stolen må ikke opbevares udendørs, og skal holdes indendørs i frostfri, tørre og ventilerede rum. Opbevaringstemperatur 0–30 grader.



- Ved transport med Flex Trafik eller handicapbus skal Eloflex fastspændes i de fæstningspunkter som billederne til højre viser. Vær opmærksom på at Eloflex ikke er testet som bilsæde. Vi anbefaler derfor altid at brugeren flyttes over i bilens egen stol.

Joystick

Batterikontrol

Sænk hastighed

Joystick

Strøm til og fra

Højere hastighed

Horn/dyt



USB-kontakt

TIP:

Du kan oplade din mobiltelefon via det USP stik, som sidder i bunden af joysticket.



Joystick: kontrollerer stolens hastighed og køreretning




Sæt farten op: Tryk for at øge stolens max hastighed. Tryk og hold nede for at hæve sædet.



Strøm til og fra : Tryk for at tænde og slukke din Eloflex



Sæt farten ned: Tryk for at sænke stolens max hastighed. Tryk og hold nede for at sænk sædet.

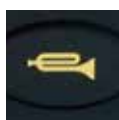

Horn: Tryk for at få opmærksomhed.

1

Batterikontrol: Her indikeres hvor meget strøm der er tilbage i batterierne. Når batterierne er fuld opladte lyser samtlige indikatorer. Som batterierne tømmes for kraft slukker indikatorerne en for en. Den skal oplades når to tredjedele af lysene er gået ud.

2

Hastighedsindikator: Alle streg tændt = maksimal hastighed.

Ekstraudstyr



Hjælper remote styring

Hjælper remote styring er et forlængerstykke med fæste som gør at du kan montere dit joystick på ryglænet af din Eloflex. Med den påmonteret kan den hjælper som går bagved eller ved siden af dig styre kørestolen med joystick'en, og du sidder bare og nyder turen. En perfekt og efterspurgt løsning for ældre brugere og for brugere som pga visse sygdomstilfælde ikke selv er i stand til at styre kørestolen.



Eloflex nakkestøtte

Nakkestøtten gør din Eloflex mere individuelt tilpasset og brugbar, selv for de brugere som har brug for lidt ekstra støtte til hoved og nakke. Nakkestøtten har mange indstillingsmuligheder og kan tilpasses til efter den enkelte brugers ønsker og behov takket være sin smarte fastgørelse. Med en nakkestøtte på din Eloflex har du en behagelig sidde- og kørestilling.

Ekstraudstyret kan bestilles igennem din forhandler eller direkte hos os.
For yderligere information og monteringsinstruktioner besøg www.eloflex.dk/ekstraudstyr

Sikkerhedsinstruktioner ved kørsel

Der er risiko for personskade hvis kørestolen vælter.

- *Kør kun på stigninger og hældninger som ikke overskrider den maksimalt tilladte hældning.*
- *Brug altid vippebeslag når du kører med Eloflex*
- *Kørsel på nedadgående strækninger bør altid foretages ved lav hastighed*
- *Undgå at køre hvor der risiko for at vælte, køre fast eller skride ud*
- *Prøv aldrig at køre op eller ned af trapper i din el-kørestol*
- *Kør aldrig over forhindringer højere end den anbefalede maxhøjde*
- *Undgå hurtige bevægelser eller ryk med joystick samt pludselige ændringer i køretningen under kørsel*

Risiko for at køre fast hvis man er alene på et øde sted.

- *Brugere med stærkt reduceret bevægelighed bør ikke køre længere strækninger udendørs alene*

Risiko for skader ved at foden glider ud af fodstøtten og ind under el-kørestolen under kørsel.

- *Placér altid fødderne på midten af fodstøtten under kørsel*

Risiko for skader hvis du kolliderer med nogen eller noget i

snævre passager.

- *Kør igennem snævre passager med laveste hastighed og største opmærksomhed*


Risiko findes for at kørestolen vælter hvis vippebelag afmonteres, skades eller fastgøres på anden måde end beskrevet i monteringsguiden.

- *Vippebeslag skal altid være fastgjort når kørestolen anvendes*
- *Vippebeslag virker kun på fast underlag. På bløde overflader som f.eks græs og sne kan vippebeslaget miste sin effekt. Kør derfor yderst forsigtigt på bløde underlag.*




Bemærk at information markeret med disse symboler er ekstra vigtige. Hvis instruktionerne ikke følges er der risiko for ulykke eller at din Eloflex tager skade.

Læs

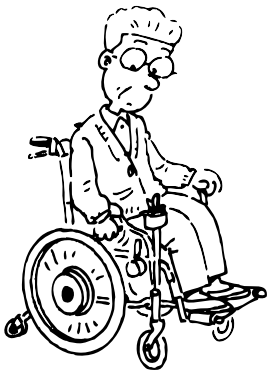

Brugeren skal læse disse sikkerheds- og kørselsinstruktioner inden elkørestolen fra Eloflex tages i brug.

Øvelse

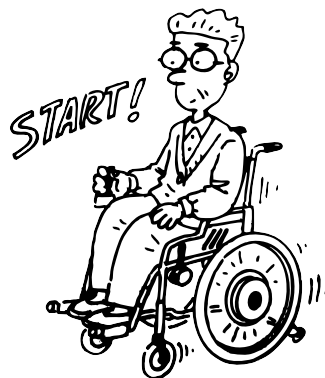

- **Øvelse gør mester.**

Træn dig i at køre Eloflex sammen med en assistent ved at begynde på et åbent område, gerne udendørs, inden du bruger din elkørestol blandt andre mennesker, i butikker eller restauranter o.s.v.


- **Kør** frem ved at bevæge joystick langsomt fremad.
- **Stands** ved at slippe joystick.

Bak



- **Bak/kør baglæns** ved at bevæge joystick langsomt bagud. For at standse slipper du joystick. Husk altid at orientere dig i kørselsretningen inden du kører for at være sikker på at ingen eller intet er i vejen for dig.

Vend

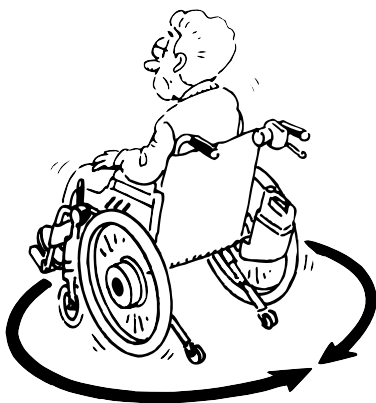


- **Vend** ved forsigtigt at bevæge joystick til siden. Orienter dig så ingen eller intet er i vejen for dig når du vender.

Drej




- **Drej** under kørsel ved forsigtigt at bevæge joystick i den retning du ønsker at dreje. Sænk altid hastigheden når du drejer.

Forhindringer

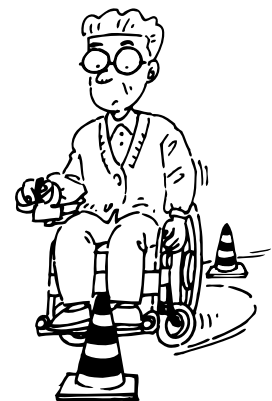

- Træn i at undvige og passere forhindringer. Bevæg joystick til siden samtidigt med at du kører frem for at undvige forhindringer. Husk at sænke farten når du nærmer dig forhindringer.


Hurtig kørsel

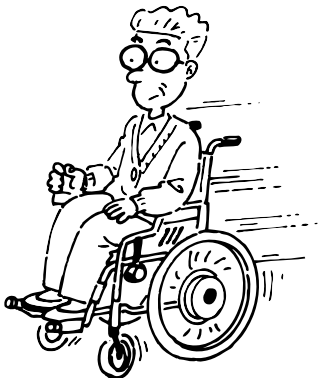

• Hurtig kørsel

Bevæg joystik lige frem hvis du vil køre hurtigt. Husk at bevæg joystik tilbage så hastigheden sænkes så snart du føler dig usikker og hvis du skal dreje eller nærmer dig en forhindring.


Kør over en forhindring

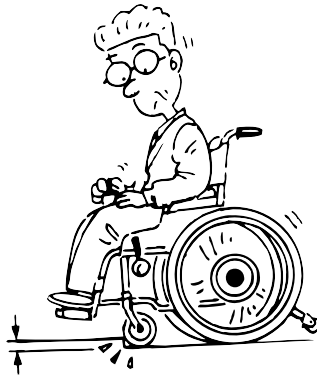

• Kørsel over forhindring

Kør langsomt frem til forhindringen og hold øje med at forhjulene er rettet i køreretningen. Bevæg derefter joystik forsigtigt frem samtidigt med at du læner dig lidt bagud for at flytte tyngdepunktet så du kan køre over forhindringen. Eloflex er testet og godkendt til at køre over forhindringer på max 6 cm.


Kør på hældninger

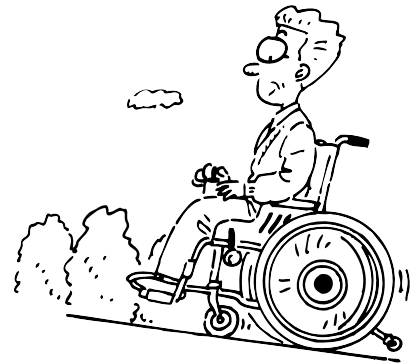

• Kørsel på hældende overflader

Prøv først at køre lige op eller lige ned af en hældning. Læn dig lidt frem når du kører opad og lidt bagud når du kører nedad for at bevare tyngdepunktet. Undgå at køre sidelæns hvis muligt og kompensér eventuel sidehældning ved at læne dig i modsat retning. Kør altid langsomt på en hældende overflade. Undgå overflader som hælder mere end 9 grader.

Kør med elevator

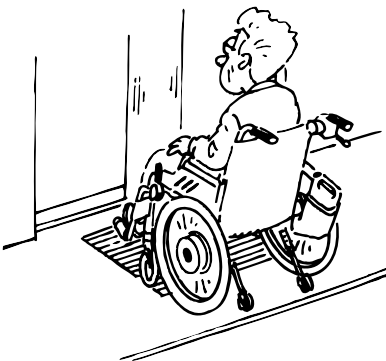


• At køre med elevator

Husk at checke bredden på elevatordøren samt hvor hurtigt døren lukkes inden du kører ind i elevatoren.

Husk at du måske skal kunne bakke ud af elevatoren hvis den ikke er stor nok til at vende i.


Kør på vej

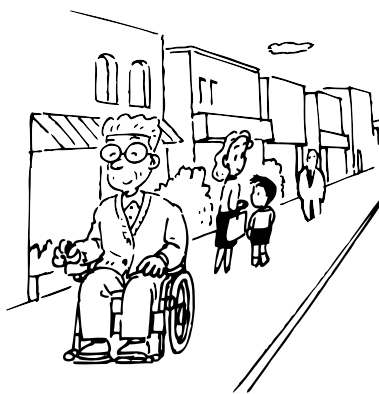

• Kørsel på veje

Kør i først og fremmest på fortove, gangstier og cykelstier og kun om nødvendigt på trafikerede veje med din Eloflex.

Krydse vejbaner

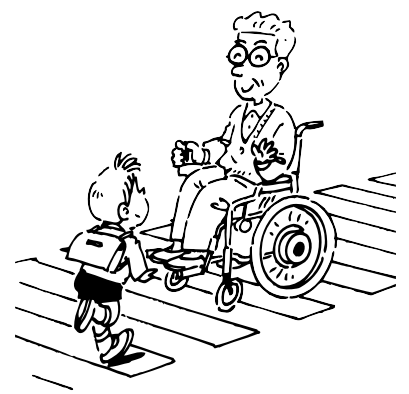

• At krydse vejbaner

Vælg om muligt altid at krydse vejbaner ved lyskryds eller fodgængerfeltet. Vær opmærksom på krydsende biler. Kør over fortovet hvor kantsten er nedsænket, hvis det findes. Undgå kantstene som er højere end 6 cm.

Almindelige sikkerhedsinstruktioner

Der er risiko for personskade hvis kørestolen anvendes til andre formål end beskrevet i dette dokument.

- *Anvend kun elkørestolen som beskrevet i instruktionen i denne brugsanvisning (se ovenfor, afsnit "Typeklassificering og tiltænkt anvendelse")*

Der er risiko for personskade hvis elkørestolen anvendes ved nedsat køreevne.

- *Anvend ikke kørestolen hvis din køreevne er nedsat på grund af, men ikke begrænset til, sygdom, medicinering eller alkohol.*

Der er risiko for personskade hvis elkørestolen ufrivilligt sættes i bevægelse.

- *Sluk elkørestolen før på- og afstigning eller hvis der er risiko for at du eller en anden person eller ting kan komme i berøring med joystik.*
- *Når motorene er i ulåst position virker bremsen ikke. Derfor må kørestolen kun rulles manuelt på flade strækninger, aldrig på hældninger. Lad den aldrig stå på eller i nærheden af hældninger med bremsen slået fra.*

Der er risiko for personskade hvis den elektriske kørestol stoppes under kørsel ved f.eks tænd/sluk knappen eller ved at en ledning rives af, fordi stolen derved stopper hårdt på stedet.

- *Slip joystik ved bremsning i nødsituation. Så standser kørestolen automatisk.*

Der er risiko for personskade ved fald ud af kørestolen.

- *Ryk dig ikke frem, bøj dig ikke fremover imellem knæene og læn dig ikke ud over kørestolens kant, som for eksempel at række ud efter noget.*
- *Brug altid sikkerhedsbæltet og indstil det hver gang du skal ud at køre.*
- *Kør så tæt på den nye siddeplads som muligt ved overførsel fra elkørestol til anden siddeplads.*

Der er risiko for personskade hvis den maksimalt tilladte vægt overskrides.

- *Vær opmærksom på den maksimalt tilladte last (se afsnit "Tekniske Data" bagerst i denne brugsanvisning.)*
- *Elkørestolen må kun anvendes af enkeltpersoner. Anvend aldrig kørestolen til at transportere mere end 1 person.*

Der er risiko for personskade og skader på kørestolen hvis låsegrebet som slås fra ved sammenklapning ikke er korrekt låst fast når kørestolen er i brug.

- *Hvis elkørestolens låsegreb ikke er klikket korrekt på plads kan stolen pludselig klappe sammen under brug, hvilket kan forårsage at du vælter ud af kørestolen.*
- *Undersøg altid at låsegrebet sidder korrekt inden elkørestolen tages i brug.*

Der er risiko for personskade og klemskader ved sammen- og udfoldning af kørestolen.

- *Fold altid elkørestolen op og sammen som beskrevet i brugsanvisningen.*
- *Vær opmærksom på at ingen eller intet bliver klemt når du folder stolen op eller sammen.*


Der er risiko for personskade og skade på kørestolen hvis den anvendes i fugtige og våde omgivelser.

- *Elkørestolen må ikke anvendes under bruseren.*
- *Elkørestolen må ikke anvendes til badning.*



Vær opmærksom på at information markeret med disse symboler er ekstra vigtige. Hvis disse instruktioner ikke følges er der risiko for uheld eller at din Eloflex tager skade.

Krydse sporveje

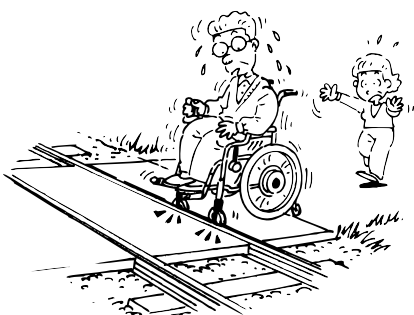


• At krydse jernbane.

Kryds altid jernbanen i lige linie, aldrig sidelæns. Kryds aldrig Jernbanespor alene, her skal du altid have altid nogen med som kan hjælpe.




Stejle skråninger

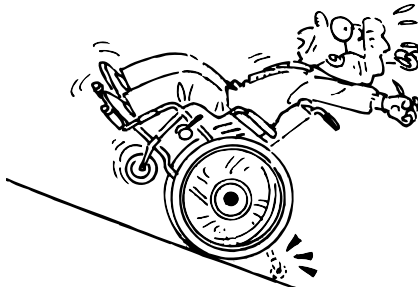

- Vær forsigtig hvis du kører på stejle hældninger fordi stolen risikere at tippe over. Eloflex er testet og godkendt til hældninger op til 9 grader. Du skal altid have nogen med som kan hjælpe dig, hvis du færdes i områder med kraftige hældninger.



Høje kanter

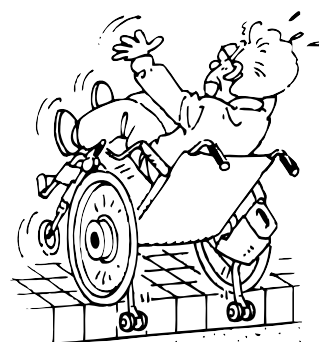

- Vær forsigtig når du kører over en kant. Eloflex er testet og godkendt for kanter op til max. 6 cm. Hvis du færdes i områder med høje kanter skal du altid have nogen med til at hjælpe dig.




Ind og ud af stolen



- Vi anbefaler at du altid har nogen som kan hjælpe dig når du skal ind og ud af din Eloflex. Slå strømmen fra inden du flytter dig, så bremserne låser. Slå armlænet og fodstøtten op inden du flytter dig, så bliver det nemmere at komme ned i og ud af stolen.



Foretag ikke reparationer

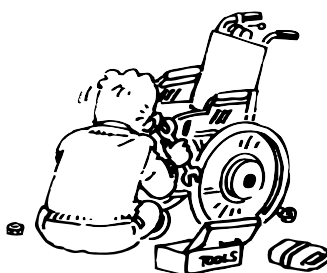

- Forsøg aldrig at lave en defekt elkørestol selv. Hvis du selv ændrer eller forsøger at lave stolen ophører garantien. Kontakt Eloflex, din kommune eller din forhandler. Modificér aldrig din Eloflex selv.



Ikke legetøj




- Lad aldrig et barn som ikke selv har erfaring i at bruge elkørestol sidde eller køre i din Eloflex.



Sikkerhed

Rengøring

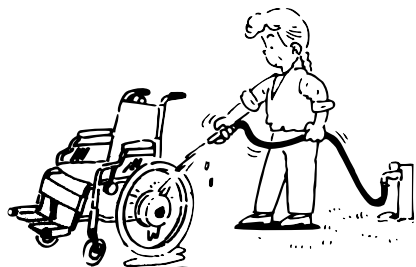

- Rengør/spul aldrig din Eloflex under/med rindende vand. Bare tør den af med en fugtig klud.

Hvis din Eloflex er stram at folde op eller sammen kan du smøre svingdele med 5-56 eller silico-nespray.



Pas på overophedning




- Efterlad aldrig din Eloflex i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder fordi batterierne kan tage skade. Hold aldrig tæet på åben ild med din Eloflex.

Du kan bruge din Eloflex i temperaturer fra -10 grader op til +45 grader uden at stolens funktioner påvirkes.




Opbevar

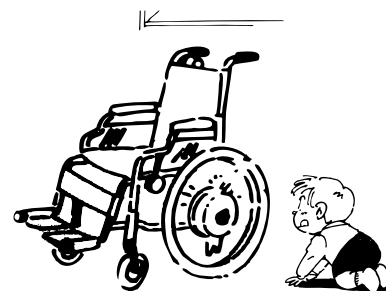

- Opbevar din Eloflex uden for rækkevidde af børn når den ikke bruges. Stolen bør opbevares indendørs i frostfri, tørre og ventilerede lokaler. Opbevarings-temperatur 0-30 grader.



Oplader

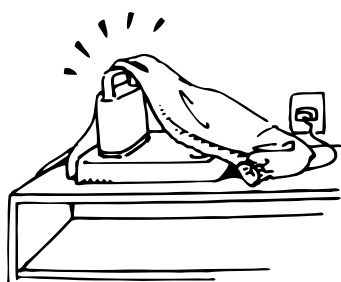

- Oplader må aldrig tildækkes når den er i brug til opladning af din Eloflex. Opladeren bliver meget varm og der er risiko for ulykke eller skade.



Batterier



- Opbevar aldrig batterierne i direkte sollys men heller ikke på et sted som kan have minusgrader. Batterierne skal opbevares på et tørt og ventileret sted.



Teknisk data

FAKTA MODELL H

VÆGT¹	38 kg
HASTIGHED	8 km/h
RÆKKEVIDDE	40 km per opladning
KÖRTID	5 timer per opladning
MOTOR	2 x trinløs højeffektmotor
MOTOREFFEKT	2 x 400 Watt
BATTERI	2 x Litium ION 20 AH / 24 V (480 Wh)
BATTERIVÆGT	1,6 kg stk.
OPLADNINGSTID	5 timer
VENDRADIUS	99 cm
MAX HÆLDINGER	12 grader
HJUL	9" for (luft) / 13" bak (luft)
SIDDEHØJDE	54 cm
SÆDEBREDDE	51 cm
SÆDEDYBE	51 cm
BRUGERVÆGT	Max 200 kg
JOYSTICK	Höger, vänster eller på rygstöd ²
SÆDE	Aftageligt. Aftageligt betræk
RYGLÆEN	Justerbar betræk
MÅL	103 cm (H) x 66 cm (B) x 115 cm (D)
MÅL SAMMENKLAPPET	83 cm (H) x 66 cm (B) x 45 cm (D)
GARANTI	2 år

1) Totalvægt inkl et batteri. 2) Hjælperstyring kræver holder som sælges som tilbehør.
Anbefalet lufttryk for baghjul = 2,5 kg.

© Copyright Eloflex

Detta dokument indeholder ophavsretligt beskyttet information og må hverken helt eller delvis kopieres eller mangfoldiggøres uden skriftlig tilladelse fra Eloflex AB.

Eloflex forbeholder sig eventuelle skrivefejl i dette dokument og vi forbeholder os retten til produktændringer.

Kontakt Eloflex

Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp beder vi dig i første omgang om at kontakte din kommune eller forhandler. Hvis du ønsker at kontakte os direkte finder du kontaktoplysninger på vores hjemmeside, www.eliflex.dk.

På hjemmesiden finder du også en supportside hvor du bl.a. finder ofte stillede spørgsmål og svar www.eliflex.dk/faq



Eloflex Danmark
Løbjerggårdsvej 1 St.
2980 Kokkedal

Telefon: 5151 7788
e-mail: info@eliflex.dk
web: www.eliflex.dk

Ring altid inden du besøger os, så vi kan booke tid.