

BRUGSANVISNING

KØRSELSINSTRUKTION

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Det er vigtigt at du læser hele denne brugsanvisning inden du tager din Eloflex i brug, for at være sikker på at du bruger den uden at løbe nogen risiko, og dermed ikke forøger skade på dig, dine omgivelser eller din el-kørestol.

Eloflex P



EL&FLEX

Tak og god fornøjelse!

Tak fordi du valgte en Eloflex som din el-kørestol. Det betyder meget for os fordi vores vision er at gøre menneskers hverdag lidt lettere, og at give mennesker som er bevægelseshæmmede en større frihed. Vi håber at det er det du vil opleve når du bruger din nye Eloflex.

Vi véd at du kommer til at få stor glæde af din nye el-kørestol. Denne brugsanvisning indeholder vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og pleje. Vi opfordrer dig til at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden du tager din Eloflex i brug for første gang. Vi anbefaler også at du øver dig i at køre din Eloflex et sted hvor du kan køre frit og uhindret, så du får fornemmelsen for at køre og styre din Eloflex, inden du bruger den i almindelig sammenhæng.

Eloflex el-kørestol er konstrueret til brugere med mange forskellige behov. Beslutningen om hvorvidt en Eloflex er det rigtige for brugeren tages af brugeren selv evt. i dialog med kommunen eller forhandleren. Eloflex fralægger sig ethvert ansvar for tilfælde hvor el-kørestolen ikke passer til brugerens behov.

En Eloflex skal først og fremmest bruges i sin standard udførelse. Hvis el-kørestolen skal tilpasses eller ændres må det kun ske igennem kommunens værksteder eller af Eloflex. Du skal være opmærksom på at skader og fejl som opstår på grund af at man ikke har fulgt brugsanvisningen eller på grund af manglende vedligeholdelse, vil disse ikke være omfattet af garantien.

Held og lykke, og rigtig god fornøjelse med dine nye Eloflex.

Kør forsigtigt !

The logo for Eloflex, featuring the word 'ELOFLEX' in a stylized, blue, sans-serif font. The letter 'O' is replaced by a blue icon of a person sitting in a wheelchair, with the person's legs and feet extending into the 'O'.

Indhold	Side
Tiltænkt anvendelse	3
Fold ud og sammen	4
Montér joystick	5
Fold joysticket	5
Manuel kørsel	5
Hæv og sænk sædet	6
Opladning	6
Joystick	7
Vippe sikring	8
Fodstøtten	8
Juster ryglænet	9
Løft armlæn	9
Justering af låsegreb	10
Ændre siddebredde	10
Transport og opbevaring	11
Ekstraudstyr	12
Kørselsinstruktion	13-15
Sikkerhedsinstruktioner	16-18
Tekniske data	19
Kontakt	20

Tiltænkt anvendelse

Typeklassificering og tiltænkt anvendelse.

Eloflex el-kørestole er udviklet for personer som har svært ved at gå eller som ikke kan gå, men har synet, førlighed og mentalt er i stand til at styre en el-kørestol.

Eloflex el-kørestol har en størrelse og bevægelighed som gør den let at bruge indendørs, men stolen er især egnet til udendørsbrug. I kapitlet "Tekniske data" finder du information om hastighed, venderadius, rækkevidde, maksimal stigning, maksimal vægt på bruger o.s.v. Vi anbefaler at du læser alt om sikkerhed i afsnittet "Sikkerhedsinstruktioner" .

Eloflex er testet og godkendt ifølge EN12184:2014 - klasse B (Inden- og udendørsbrug).

Eloflex er også godkendt ifølge ISO-7176, IEC60601 og batterierne er godkendt ifølge UN38.3.

Eloflex el-kørestole opfylder alle anbefalede krav i loven (1993:584) om medicintekniske produkter samt i forskrifterne (LVFS 2003:11 og LVFS 222009:18) om medicintekniske produkter. Produktet opfylder herved kravene i EU's direktiv om medicintekniske produkter, 93/42/EEU og 22007/47/EU.

Sammenligningsbedømmelse/CE-mærkning ifølge klasse 1 er udført i overensstemmelse med det medicintekniske direktiv 93/42 EEG / MPG (lov om medicintekniske produkter) og gælder kun for det komplette produkt. CE-mærkningen bliver ugyldig hvis man udskifter dele og/eller ekstraudstyr som ikke er godkendt til dette produkt.

Anvendelse/behov

Hensigten med en Eloflex el-kørestol er at kompensere for en skade eller nedsat funktion, hvorfor den anbefales til følgende :

- Hvis brugeren ikke kan, eller er stærkt begrænset i at gå, hvilket gør det svært at bevæge sig omkring i hjemmet og lokalt.
- Hvis der behov for at kunne bevæge sig ud fra hjemmet for at komme ud i den friske luft eller for at kunne komme til de steder som normalt skal besøges for at udføre de daglige ærinder.
- Hvis brugeren har svært ved at komme til, eller at udføre arbejde og andre aktiviteter på grund af sin begrænsede bevægelighed.

Eloflex er egnet til brug både inden- og udendørs, og hvis det på grund af begrænset bevægelighed ikke er muligt at anvende manuel kørestol, men brugeren er i stand til på korrekt vis at håndtere en el-kørestol, er Eloflex det oplagte valg.

Tilbehør

Oplader og pung med almindeligt værktøj ligger i posen under sædet når stolen leveres.

Anvendelse

Anvend kun Eloflex el-kørestol når den er i fuld funktionsdygtig stand. Ellers udsætter du dig selv og andre for risiko. Følgende liste indeholder visse tænkelige situationer. Den beskriver kun visse situationer som kan påvirke anvendeligheden af el-kørestolen.

- Anvend ikke el-kørestolen hvis batterierne er defekte eller deformere.
- Anvend ikke el-kørestolen hvis motorene kører i ryk eller lyder unormalt.
- Anvend ikke el-kørestolen hvis det virker som om der er fejl ved bremserne.
- Kontakt din kommune eller forhandler hvis dækkene er nedslidt.
- Kontakt din kommune eller forhandler hvis du opdager skade på sikkerhedsbælte, armlæn, sæde, ryglæn, joystick eller anden del af stolen.
- Kontakt din kommune eller forhandler hvis du opdager skade på de elektriske dele (ledninger, batterier, oplader o.s.v.)

Garanti

Du har to års garanti på din el-kørestol fra Eloflex. Garantibetingelser er i overensstemmelse med de gældende nationale og generelle forretningsbetingelser og love. De detaljerede garantibetingelser kan du downloade på www.eloflex.dk. Du skal huske at gemme originalemballagen som du modtog din Eloflex i, under hele garantiperioden. Du kan folde kartonen sammen og opbevare den sammen med de 2 hvide stødpuder i tilfælde af at stolen skal returneres under garantiperioden.

Holdbarhed

Din Eloflex er beregnet til at holde i mindst 5 år. Produktets levetid påvirkes dog i stor udstrækning af hvordan den anvendes og passes. En Eloflex kan have betydeligt længere levetid hvis man passer på den og bruger den som beskrevet i denne skrivelse.

Sikkerhedsinstruktioner og risici

LÆS BÅDE KØREINSTRUKTION OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER GRUNDIGT IGennem INDEN DU TAGER DIN ELOFLEX I BRUG.



Fold ud og sammen

Fold ud

Trin 1

Læg den sammenfoldede stol på jorden som på billedet til højre. Hold fast i ryglænet og træk op for at folde stolen op. Hold imod med en hånd på sædet.



Trin 2

Lås låsegrebet – det er meget vigtigt!



Fold sammen

Trin 1

Åben låsegrebet som vist på billedet til højre.



Trin 2

Placér hånden på den øvre del af ryglænet. Tag fra i den øvre del af ryglænet med den anden hånd og fold den sammen. Pres stolen helt sammen som vist på billedet til højre.



Installér joystick-kontrollen

Trin 1

Montér joystick i åbningen under armlænet og spænd låshanen samt skrue på modsat side af holderen så låshanen kan låse holderen i den ønskede position.



Trin 2

Forbind joystick og kabel og sæt dem forsigtigt sammen så de små stifter ikke bøjer eller brækker, spænd derefter de 2 plastik gevind på de respektive stik imod hinanden.



VIGTIGT!

Det gøres forsigtigt så metal stifterne i kontakten ikke bliver skadet eller bøjet.

Fold joysticket ned

Holderen på joysticket gør at brugeren hurtigt kan folde joysticket ned, uden at skulle afmontere det fra armlænet. Det betyder at man kan komme ind til bordet og sidde godt når man skal spise.

1. Åben låshanen for at løsne joysticket.
2. Træk forsigtigt joysticket frem, og lad det så svinge ned så det peger mod jorden.



Læs mere!

Hvis du ønsker at have joysticket over på venstre armlæn finder du instruktion på www.eloflex.dk/instruktioner

Manuel kørsel

Ryk de 2 røde håndtag som sidder på hver sin motor (se billede) frem imod batterierne, sådan frakobler du de magnetiske bremses. I denne position kan stolen ruller manuelt.

OBS! Hvis brugeren anvender stolen alene uden hjælp skal stolens magnetiske bremses altid været slået til.



VIGTIGT!

Spark **ALDRIG** til de røde håndtag. Anvend kun håndkraft.

Hæv og sænk sædet

Du kan hæve sædet og samtidigt vippe det fremad for lettere ind- og udstigning.

Hæv sædet

1. Sørg for at kørestolen er i låst position og at strømmen er tilsluttet.
2. Fold fodstøtten ind under sædet.
3. Sæt begge fødder på jorden.
4. Tænd for stolen og tryk + knappen (pil 1) og hold den nede indtil den ønskede position er nået.
5. Slip + knappen når du har nået den ønskede position.



Sænk sædet

1. Sørg for at du sidder stabilt midt på sædet.
2. Tænd for stolen og tryk på - knappen (pil 2) og hold den nede indtil sædet er kommet helt ned.
3. Slip knappen når sædet ikke kan komme længere ned.



Opladning af batterier

Sådan lader du batterierne op

Start med at slukke for din Eloflex (alle lamper i joysticket skal være slukkede).

Sæt det 3 benede oplader stik ind i indtaget på joystickets front. Vær opmærksom på at de 3 ben i stikket passer til de 3 tilsvarende huller i joysticket før du presser stikket ind i joysticket. Derefter sætter du stikket i kontakten og tænder på kontakten i væggen.

Opladning indikeres ved at en rød lampe lyser i ladeboksen. Når lampen er rød oplader stolen. Efter 3-5 timer lyser laderen grøn og så er batteriene fuldt opladt.

Når opladeren arbejder bliver ladeboksen varm, og det er helt normalt.

For at få maksimal levetid for dine batte-



rier anbefaler vi at du sætter din stol til opladning når batteri indikatoren er nede på 2-3 grønne lys. Husk at tage opladeren ud når batterierne er fuldt opladt. Lad ikke stolen stå med tændt oplader efter den er fuldt opladt.

Hvis du bruger din Eloflex om vinteren

i minusgrader så påvirkes kørestrækningen. For eksempel ; hvis du kører en tur i minus 10' celcius så reduceres din rækkevidde med ca 50%.

Yderligere information om batterier og opladning findes på www.eloflex.dk



VIGTIGT!
Sæt **ALDRIG**
opladeren til
opladning direkte
nede i batterierne.
Opladning må
KUN ske
igennem Joystick.

Joystick

Batterikontrol

Sænk hastighed og sænk sædet

Joystick

Strøm til og fra

Højere hastighed og hæv sædet

Horn/dyt



USB-kontakt

TIP:

Du kan oplade din mobiltelefon via det USP stik, som sidder i bunden af joysticket.



Joystick: kontrollerer stolens hastighed og køreretning




Sæt farten op: Tryk for at øge stolens max hastighed. Tryk og hold nede for at hæve sædet.



Strøm til og fra : Tryk for at tænde og slukke din Eloflex



Sæt farten ned: Tryk for at sænke stolens max hastighed. Tryk og hold nede for at sænke sædet.

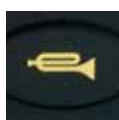

Horn: Tryk for at få opmærksomhed.

1

Batterikontrol: Her indikeres hvor meget strøm der er tilbage i batterierne. Når batterierne er fuld opladte lyser samtlige indikatorer. Som batterierne tømmes for kraft slukker indikatorerne en for en. Den skal oplades når to tredjedele af lysene er gået ud.

2

Hastighedsindikator: Alle streg er tændt = maksimal hastighed.

Vippe sikring

For sikker kørsel skal Vippe sikringen altid være i sit yderste position.
For sikker kørsel skal Vippe sikringen altid være i sit yderste position.

1. Drej vingeskruen op så Vippe sikringen kan trækkes bagud.
2. Træk Vippe sikringen ca. 5 cm bagud.
3. Spænd vingeskruen hårdt fast.

OBS! Vippe sikringen skal altid være i yderste position når du bruger stolen.



Fodstøtten

For lettere ind- og udstigning kan fodstøtten slås op som billederne nedenfor viser.



Justér fodstøtten

Hvis fodstøtten ikke bliver i opslået stand kan du indstille fastheden i fodstøtten.

Trin 1

Fjern de 2 små sorte plasthætter som sidder på de to møtrikker.

Trin 2

Drej på skrueerne med en umbraconøgle samtidigt med at du holder imod på møtrikkerne med en skruenøgle eller papegøjetang.



Lås møtrikkerne med speciallim (spørg i butikken) når du har spændt dem tilpas fast, så behøver du ikke gentage proceduren igen.

Juster ryglænet

Indstil højde

Du kan indstille højden på ryglænet trinløst.

1. Løsn skruerne bag på hver ryg Stolpe.
2. Træk ryglænet op til den ønskede position.
3. Spænd skruerne helt fast.
4. Indstil eventuelt de elastikker med velcroluk under dækket i ryglænet til den ønskede position.



Justér rygdækken

Løft bagstykket af ryglænet ved at trække op i flappen der vender ned mod sædet. Spænd eller løsn på velcrobåndene for at opnå den mest komfortable siddestilling. Læg bagstykket tilbage og tryk så det fæstner på velcrobåndene.



Løft armlæn

For at løfte armlænet ved ind- og udstigning, løsn først den sorte svingeskruer en halv omgang. Så kan armlænet slås op.



Det er vigtigt at du husker at låse armlænet fast igen når der slået ned, det gøres ved at dreje svingeskruen en halv omgang tilbage til låst position.



Justering af låsegreb


Hvis låsegrebet er trægt eller løst kan det spændes eller løsnes via de to fjedre på hver side af grebet.

Trin 1

Fjern de 2 små sorte plasthætter som dækker møtrikkerne.

Trin 2

Drej møtrikken som holder fjederen samtidigt med at du holder i stykket under fjederen med en Papegøjetang.

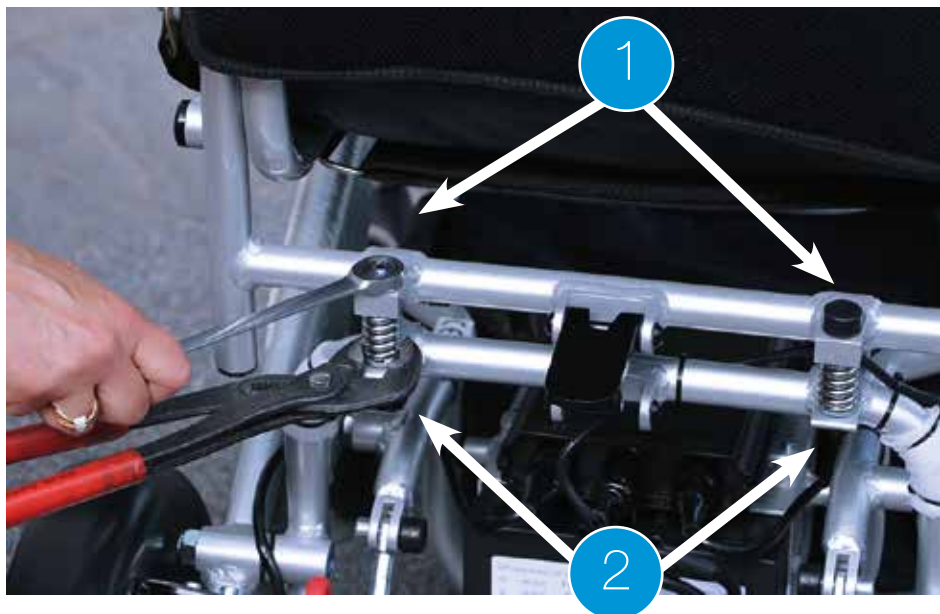

Det er vigtigt at låseclippen på din Eloflex er stram at dreje op og ned. Den skal være så tilpas stram at den kan stå i vandret position uden at svinge ned, som billedet ovenfor viser. Det er vigtigt for at låseclippen vil forblive i sin låste position selv når fjedrene presses sammen. For at stramme låseclippen skal du bare spænde de 2 skruer som sidder i låseclippen.



Ændre siddebredde

Du kan øge siddebredden ved at anvende breddekittet og derved rykke armlænen ud til siderne.


Du kan vælge at øge siddebredden med hhv. 5 eller 10 cm.

Trin 1

Løsn armlænen på begge sider ved at skrue disse to spænder løs.

Trin 2

Påsat breddestykket imellem stolen og armlænen. Sæt armlænet tilbage på plads.

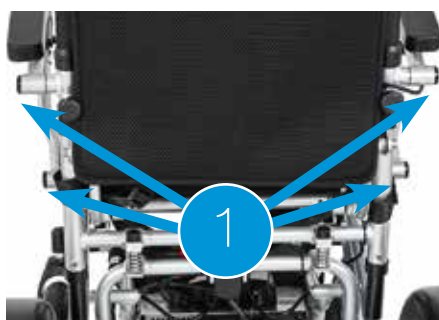

Du kan bestille breddekittet helt gratis fra Eloflex. Send email med din bestilling til info@eloflex.dk.

Transport og opbevaring

- For at løfte stolen anbefales det at starte med at folde stolen sammen og så stille den op så den støtter på baghjulet og støtteben. Derefter kan du løfte den. Råd til hvordan du lettest lægger stolen ind bilen kan du finde på www.eloflex.dk/laste
- En sammenklappet stol kan lægges i bagagerummet på en bil eller stilles i en garderobe.
- Hvis stolen ikke skal bruges i en længere periode anbefaler vi at batterierne oplades 100% inden stolen stilles væk.
- Stolen skal opbevares indendørs i frostfri, tørre og ventilerede rum. Opbevaringstemperatur 0-30 grader.
- Hvis du skal ud og flyve med din Eloflex anbefaler vi at du først læser den information vi har samlet på vores hjemmeside vedrørende IATA's regler for transport af lithium batterier www.eloflex.dk/faq
- Hvis stolen skal transporteres med andre former for køretjenester end egen bil eller handicaptransport, skal Eloflex fastgøres på de punkter som billederne nedenfor viser. OBS Eloflex er ikke testet som bilsæde under kørsel. Vi anbefaler derfor altid at brugeren anvender køretøjets egne sæder.



Ekstraudstyr



Eloflex taske

Tasken er det perfekte tilbehør til dig som vil passe ekstra godt på din Eloflex når den skal fragtes, som når du checker ind i lufthavnen eller lægger den i bilen. Tasken er sort og lavet af slidstærk nylonvævning. Man trækker tasken ned over Eloflex'en når den står sammenklappet og lukker den ved at bruge velcro luk under stolen. Tasken har 2 håndtag.



Hjælper remote styring

Hjælper remote styring er et forlængerstykke med fæste som gør at du kan montere dit joystick på ryglænet af din Eloflex. Med den påmonteret kan den hjælper som går bagved eller ved siden af dig styre kørestolen med joystick'en, og du sidder bare og nyder turen. En perfekt og efterspurgt løsning for ældre brugere og for brugere som pga visse sygdomstilfælde ikke selv er i stand til at styre kørestolen.



Eloflex nakkestøtte

Nakkestøtten gør din Eloflex mere individuelt tilpasset og brugbar, selv for de brugere som har brug for lidt ekstra støtte til hoved og nakke. Nakkestøtten har mange indstillingsmuligheder og kan tilpasses til efter den enkelte brugers ønsker og behov takket være sin smarte fastgørelse. Med en nakkestøtte på din Eloflex har du en behagelig sidde- og kørestilling.



Premium puden Airpad

Ved hjælp af et intelligent luftkammer i kombination med viskose-elastisk skum og en ventil kan pudens fasthed indstilles til ønsket hårdhed. Airpad klarer 150 kg brugervægt og er 8 cm høj. Airpad er en luftfyldt etkammerpude som reguleres med en ventil. Ved at lukke luft ud af pudens luftkammer bliver den blødere at sidde på. Lufttrykket reguleres helt uden brug af pumpe.

Ekstraudstyret kan bestilles igennem din forhandler eller direkte hos os.
For yderligere information og monteringsinstruktioner besøg www.eloflex.dk/ekstraudstyr

Sikkerhedsinstruktioner ved kørsel

Der er risiko for personskade hvis kørestolen vælter.

- *Kør kun på stigninger og hældninger som ikke overskrider den maksimalt tilladte hældning.*
- *Brug altid vippebeslag når du kører med Eloflex*
- *Kørsel på nedadgående strækninger bør altid foretages ved lav hastighed*
- *Undgå at køre hvor der risiko for at vælte, køre fast eller skride ud*
- *Prøv aldrig at køre op eller ned af trapper i din el-kørestol*
- *Kør aldrig over forhindringer højere end den anbefalede maxhøjde*
- *Undgå hurtige bevægelser eller ryk med joystick samt pludselige ændringer i køretningen under kørsel*

Risiko for at køre fast hvis man er alene på et øde sted.

- *Brugere med stærkt reduceret bevægelighed bør ikke køre længere strækninger udendørs alene*

Risiko for skader ved at foden glider ud af fodstøtten og ind under el-kørestolen under kørsel.

- *Placér altid fødderne på midten af fodstøtten under kørsel*

Risiko for skader hvis du kolliderer med nogen eller noget i

snævre passager.

- *Kør igennem snævre passager med laveste hastighed og største opmærksomhed*

Risiko findes for at kørestolen vælter hvis vippebelag afmonteres, skades eller fastgøres på anden måde end beskrevet i monteringsguiden.

- *Vippebeslag skal altid være fastgjort når kørestolen anvendes*
- *Vippebeslag virker kun på fast underlag. På bløde overflader som f.eks græs og sne kan vippebeslaget miste sin effekt. Kør derfor yderst forsigtigt på bløde underlag.*



Bemærk at information markeret med disse symboler er ekstra vigtige. Hvis instruktionerne ikke følges er der risiko for ulykke eller at din Eloflex tager skade.

Læs



Brugeren skal læse disse sikkerheds- og kørselsinstruktioner inden elkørestolen fra Eloflex tages i brug.

Øvelse



- **Øvelse gør mester.**

Træn dig i at køre Eloflex sammen med en assistent ved at begynde på et åbent område, gerne udendørs, inden du bruger din elkørestol blandt andre mennesker, i butikker eller restauranter o.s.v.


- **Kør** frem ved at bevæge joystick langsomt fremad.
- **Stands** ved at slippe joystick.

Bak




- **Bak/kør baglæns** ved at bevæge joystick langsomt bagud. For at standse slipper du joystick. Husk altid at orientere dig i kørselsretningen inden du kører for at være sikker på at ingen eller intet er i vejen for dig.

Vend

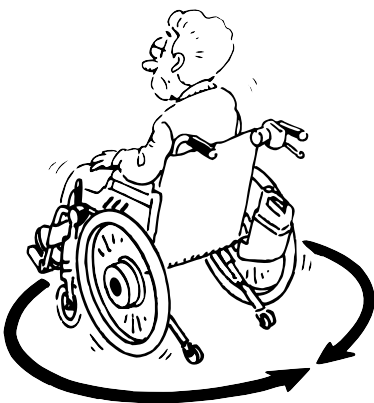


- **Vend** ved forsigtigt at bevæge joystick til siden. Orienter dig så ingen eller intet er i vejen for dig når du vender.

Drej

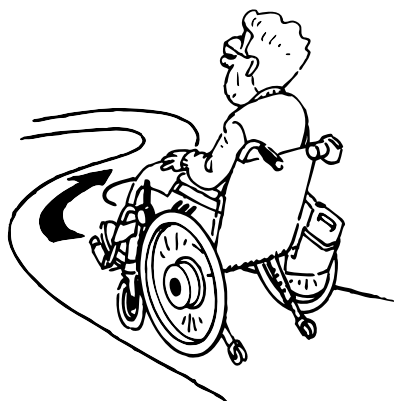


- **Drej** under kørsel ved forsigtigt at bevæge joystick i den retning du ønsker at dreje. Sænk altid hastigheden når du drejer.

Forhindringer

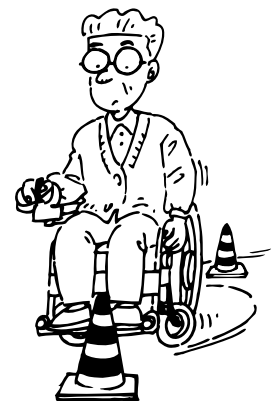

- Træn i at undvige og passere forhindringer. Bevæg joystick til siden samtidigt med at du kører frem for at undvige forhindringer. Husk at sænke farten når du nærmer dig forhindringer.


Hurtig kørsel

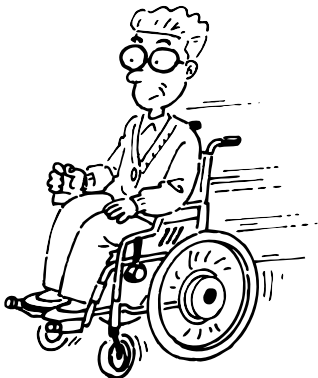

• Hurtig kørsel

Bevæg joystik lige frem hvis du vil køre hurtigt. Husk at bevæg joystik tilbage så hastigheden sænkes så snart du føler dig usikker og hvis du skal dreje eller nærmer dig en forhindring.


Kør over en forhindring

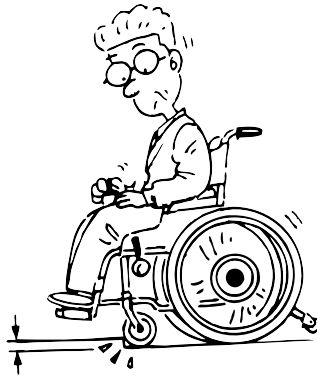

• Kørsel over forhindring

Kør langsomt frem til forhindringen og hold øje med at forhjulene er rettet i køreretningen. Bevæg derefter joystik forsigtigt frem samtidigt med at du læner dig lidt bagud for at flytte tyngdepunktet så du kan køre over forhindringen. Eloflex er testet og godkendt til at køre over forhindringer på max 6 cm.


Kør på hældninger

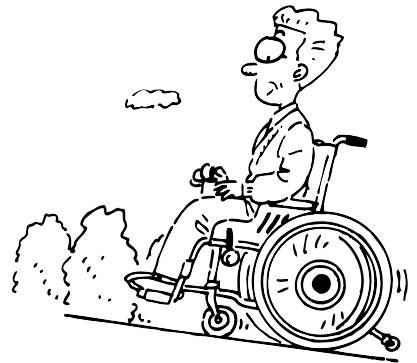

• Kørsel på hældende overflader

Prøv først at køre lige op eller lige ned af en hældning. Læn dig lidt frem når du kører opad og lidt bagud når du kører nedad for at bevare tyngdepunktet. Undgå at køre sidelæns hvis muligt og kompensér eventuel sidehældning ved at læne dig i modsat retning. Kør altid langsomt på en hældende overflade. Undgå overflader som hælder mere end 9 grader.

Kør med elevator

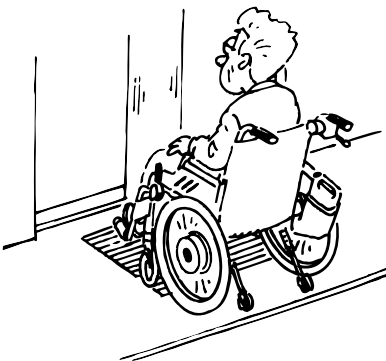


• At køre med elevator

Husk at checke bredden på elevatordøren samt hvor hurtigt døren lukkes inden du kører ind i elevatoren.

Husk at du måske skal kunne bakke ud af elevatoren hvis den ikke er stor nok til at vende i.


Kør på vej

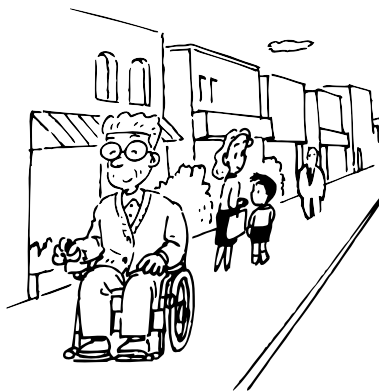

• Kørsel på veje

Kør i først og fremmest på fortove, gangstier og cykelstier og kun om nødvendigt på trafikerede veje med din Eloflex.

Krydse vejbaner

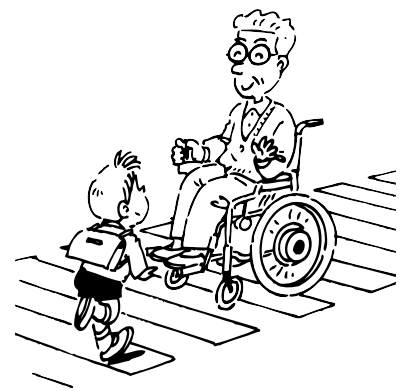

• At krydse vejbaner

Vælg om muligt altid at krydse vejbaner ved lyskryds eller fodgængerfeltet. Vær opmærksom på krydsende biler. Kør over fortovet hvor kantsten er nedsænket, hvis det findes. Undgå kantstene som er højere end 6 cm.

Almindelige sikkerhedsinstruktioner

Der er risiko for personskade hvis kørestolen anvendes til andre formål end beskrevet i dette dokument.

- *Anvend kun elkørestolen som beskrevet i instruktionen i denne brugsanvisning (se ovenfor, afsnit "Typeklassificering og tiltænkt anvendelse")*

Der er risiko for personskade hvis elkørestolen anvendes ved nedsat køreevne.

- *Anvend ikke kørestolen hvis din køreevne er nedsat på grund af, men ikke begrænset til, sygdom, medicinering eller alkohol.*

Der er risiko for personskade hvis elkørestolen ufrivilligt sættes i bevægelse.

- *Sluk elkørestolen før på- og afstigning eller hvis der er risiko for at du eller en anden person eller ting kan komme i berøring med joystik.*
- *Når motorene er i ulåst position virker bremsen ikke. Derfor må kørestolen kun rulles manuelt på flade strækninger, aldrig på hældninger. Lad den aldrig stå på eller i nærheden af hældninger med bremsen slået fra.*

Der er risiko for personskade hvis den elektriske kørestol stoppes under kørsel ved f.eks tænd/sluk knappen eller ved at en ledning rives af, fordi stolen derved stopper hårdt på stedet.

- *Slip joystik ved bremsning i nødsituation. Så standser kørestolen automatisk.*

Der er risiko for personskade ved fald ud af kørestolen.

- *Ryk dig ikke frem, bøj dig ikke fremover imellem knæene og læn dig ikke ud over kørestolens kant, som for eksempel at række ud efter noget.*
- *Brug altid sikkerhedsbæltet og indstil det hver gang du skal ud at køre.*
- *Kør så tæt på den nye siddeplads som muligt ved overførsel fra elkørestol til anden siddeplads.*

Der er risiko for personskade hvis den maksimalt tilladte vægt overskrides.

- *Vær opmærksom på den maksimalt tilladte last (se afsnit "Tekniske Data" bagerst i denne brugsanvisning.)*
- *Elkørestolen må kun anvendes af enkeltpersoner. Anvend aldrig kørestolen til at transportere mere end 1 person.*

Der er risiko for personskade og skader på kørestolen hvis låsegrebet som slås fra ved sammenklapning ikke er korrekt låst fast når kørestolen er i brug.

- *Hvis elkørestolens låsegreb ikke er klikket korrekt på plads kan stolen pludselig klappe sammen under brug, hvilket kan forårsage at du vælter ud af kørestolen.*
- *Undersøg altid at låsegrebet sidder korrekt inden elkørestolen tages i brug.*

Der er risiko for personskade og klemskader ved sammen- og udfoldning af kørestolen.

- *Fold altid elkørestolen op og sammen som beskrevet i brugsanvisningen.*
- *Vær opmærksom på at ingen eller intet bliver klemt når du folder stolen op eller sammen.*


Der er risiko for personskade og skade på kørestolen hvis den anvendes i fugtige og våde omgivelser.

- *Elkørestolen må ikke anvendes under bruseren.*
- *Elkørestolen må ikke anvendes til badning.*



Vær opmærksom på at information markeret med disse symboler er ekstra vigtige. Hvis disse instruktioner ikke følges er der risiko for uheld eller at din Eloflex tager skade.

Krydse sporveje

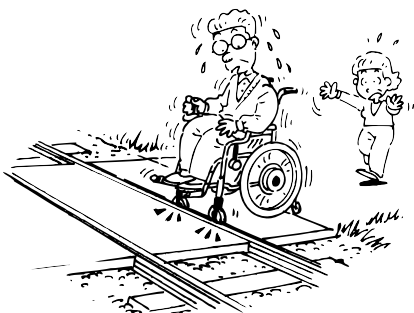


- **At krydse jernbane.**

Kryds altid jernbanen i lige linie, aldrig sidelæns. Kryds aldrig Jernbanespor alene, her skal du altid have altid nogen med som kan hjælpe.




Stejle skråninger

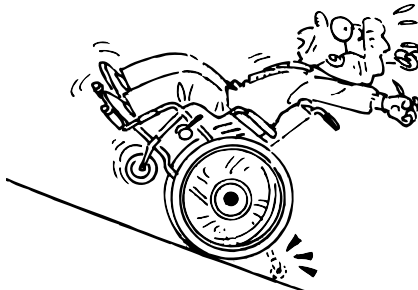

- Vær forsigtig hvis du kører på stejle hældninger fordi stolen risikere at tippe over. Eloflex er testet og godkendt til hældninger op til 9 grader. Du skal altid have nogen med som kan hjælpe dig, hvis du færdes i områder med kraftige hældninger.



Høje kanter

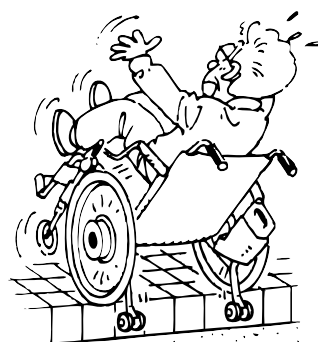

- Vær forsigtig når du kører over en kant. Eloflex er testet og godkendt for kanter op til max. 6 cm. Hvis du færdes i områder med høje kanter skal du altid have nogen med til at hjælpe dig.




Ind og ud af stolen



- Vi anbefaler at du altid har nogen som kan hjælpe dig når du skal ind og ud af din Eloflex. Slå strømmen fra inden du flytter dig, så bremserne låser. Slå armlænet og fodstøtten op inden du flytter dig, så bliver det nemmere at komme ned i og ud af stolen.



Foretag ikke reparationer

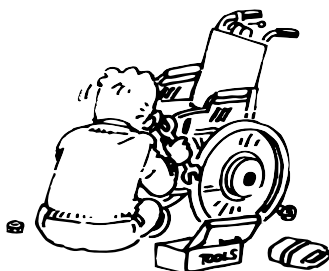

- Forsøg aldrig at lave en defekt elkørestol selv. Hvis du selv ændrer eller forsøger at lave stolen ophører garantien. Kontakt Eloflex, din kommune eller din forhandler. Modificér aldrig din Eloflex selv.



Ikke legetøj




- Lad aldrig et barn som ikke selv har erfaring i at bruge elkørestol sidde eller køre i din Eloflex.



Sikkerhed

Rengøring

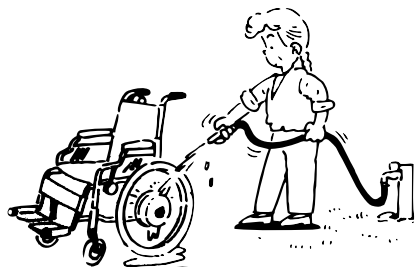

- Rengør/spul aldrig din Eloflex under/med rindende vand. Bare tør den af med en fugtig klud.

Hvis din Eloflex er stram at folde op eller sammen kan du smøre svingdele med 5-56 eller silico-nespray.



Pas på overophedning




- Efterlad aldrig din Eloflex i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder fordi batterierne kan tage skade. Hold aldrig tæet på åben ild med din Eloflex.

Du kan bruge din Eloflex i temperaturer fra -10 grader op til +45 grader uden at stolens funktioner påvirkes.




Opbevar

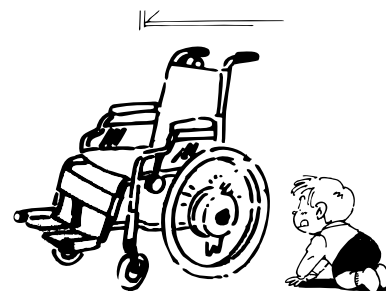

- Opbevar din Eloflex uden for rækkevidde af børn når den ikke bruges. Stolen bør opbevares indendørs i frostfri, tørre og ventilerede lokaler. Opbevarings-temperatur 0-30 grader.



Oplader

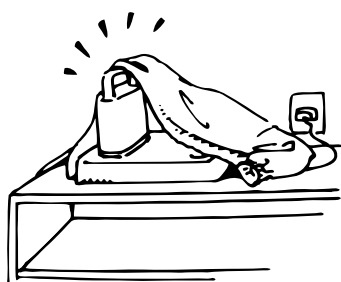

- Oplader må aldrig tildækkes når den er i brug til opladning af din Eloflex. Opladeren bliver meget varm og der er risiko for ulykke eller skade.



Batterier



- Opbevar aldrig batterierne i direkte sollys men heller ikke på et sted som kan have minusgrader. Batterierne skal opbevares på et tørt og ventileret sted.



Teknisk data

FAKTA MODELL P

VÆGT¹	28 kg
HASTIGHED	6,5 km/h
RÆKKEVIDDE	30 km per opladning
MOTOR	2 x trinløs højeffektmotor
MOTOREFFEKT	2 x 250 Watt
BATTERI	2 x Litium ION 10 AH / 24 V (240 Wh)
BATTERIVÆGT	1,6 kg stk.
OPLADNINGSTID	3 timer
VENDERADIUS	85 cm
MAX HÆLDINGER	9 grader
HJUL	8" for (massive) / 12" bag (luft)
SIDDEHØJDE	54 cm
SÆDEBREDDE	45 / 50 / 55 cm
SÆDEDYBDE	43 – 48 cm
BRUGERVÆGT	Max 160 kg
JOYSTICK	Højre, venstre eller på ryglæen ²
SÆDE	Aftageligt. Aftageligt betræk
RYGLÆEN	Justerbar højde og betræk
MÅL	90 cm (H) x 62 cm (B) x 107 cm (D)
MÅL SAMMENKLAPPET	74 cm (H) x 62 cm (B) x 40 cm (D)
GARANTI	2 år

1) Totalvægt inkl et batteri. 2) Hjælperstyring kræver holder som sælges som tilbehør.
Anbefalet lufttryk for baghjul = 2,5 kg.

© Copyright Eloflex

Detta dokument indeholder ophavsretsligt beskyttet information og må hverken helt eller delvis kopieres eller mangfoldiggøres uden skriftlig tilladelse fra Eloflex AB.

Eloflex forbeholder sig eventuelle skrivefejl i dette dokument og vi forbeholder os retten til produktændringer.

Kontakt Eloflex

Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp beder vi dig i første omgang om at kontakte din kommune eller forhandler. Hvis du ønsker at kontakte os direkte finder du kontaktoplysninger på vores hjemmeside, www.eloflex.dk.

På hjemmesiden finder du også en supportside hvor du bl.a. finder ofte stillede spørgsmål og svar www.eloflex.dk/faq



Eloflex Danmark
Løvbjerggårdsvej 1 St.
2980 Kokkedal

Telefon: 5151 7788
e-mail: info@eloflex.dk
web: www.eloflex.dk

Ring altid inden du besøger os, så vi kan booke tid.